

Sanidyne®

SANITIZADORES UV DE ÁREA PORTÁTIL



PRIME ❄️
143 Watts UV



PRIME ❄️ **REMOTE**
143 Watts UV



PLUS +
312 Watts UV



PREMIUM ⚙️
480 Watts UV

Online: www.fahsal.com

Email: fernando.martin@fahsal.com

Tel: +17862615465

ACERCA DE NOSOTROS

Desde 1963, our Ultraviolet Corporation® ha sido pionera en el descubrimiento y desarrollo de los usos beneficiosos de la energía ultravioleta. A través de los años, estos esfuerzos



han conducido al desarrollo de técnicas valiosas de bajo costo, no perjudiciales al medioambiente que han sido aplicadas a productos conocidos y respetados a nivel mundial.

Los especialistas de de Ultraviolet Corporation® proveen asistencia al cliente en la selección de lámparas y equipos germicidas. Su conocimiento especializado es un recurso valioso en la formulación de soluciones eficaces y económicas ultravioleta. Inventarios amplios y un personal dedicado permiten que Ultraviolet Corporation® cumpla su compromiso de proporcionar un suministro y servicio rápido y responsable al client .



PRIME ❄️



PRIME ❄️ REMOTE



PLUS ⚡️



PREMIUM ⚙️

ULTRAVIOLETA GERMICIDA

El método de desinfección ultravioleta es rápido y único. Este, utiliza lámparas ultravioleta germicidas que producen radiación de onda corta — 254 nanómetros (nm) — medida letal para las bacterias, los virus y otros microorganismos.

Un número creciente de industrias y público en general han hallado en la luz ultravioleta la solución ideal para sus necesidades de tratamiento de aire y superficies.

Los equipos y sistemas de la serie Ultraviolet son manufacturados en EE. UU.

Eficiente

Balastos electrónicos Surelite™ de alta eficiencia encienden el **Sanidyne Plus®**.

Sencillo

Mantenimiento y uso simple.

Rápido

Un ambiente grande, como de 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), puede ser tratado en 15 minutos. (Espacios más grandes requieren más tiempo, vea la tabla en las páginas 14–15).

Efectivo

Desinfecta el aire y las superficies expuestas utilizando lámparas con longitud de onda ultravioleta germicida.

Durable

Acero inoxidable pulido.

Portátil

La unidad puede ser transportada fácilmente de un área a otra.

Seguro


El **Sanidyne® Prime Remote**, **Sanidyne® Plus**, y **Sanidyne® Premium** tienen sensores para evitar incidencias de intrusión.

Fácil

Las unidades se controlan a través de teclado electrónico.

Los Sanitizadores UV de Área Portátil **Sanidyne®** han sido meticulosamente concebidos para purificar el aire y las superficies expuestas en áreas **desocupadas** por medio de ocho lámparas ultravioleta germicidas de alto rendimiento. Estas lámparas especiales generan altos niveles de radiación ultravioleta germicida a niveles letales para organismos infecciosos como las bacterias, el moho, y los virus.

La dosis de desinfección ultravioleta es función de tiempo e intensidad al cual el aire y las superficies adyacentes han sido expuestos. Nuestros especialistas en UV con gusto realizar los cálculos necesarios para asegurar que el sanitizador que suministremos sea el adecuado para sus necesidades.

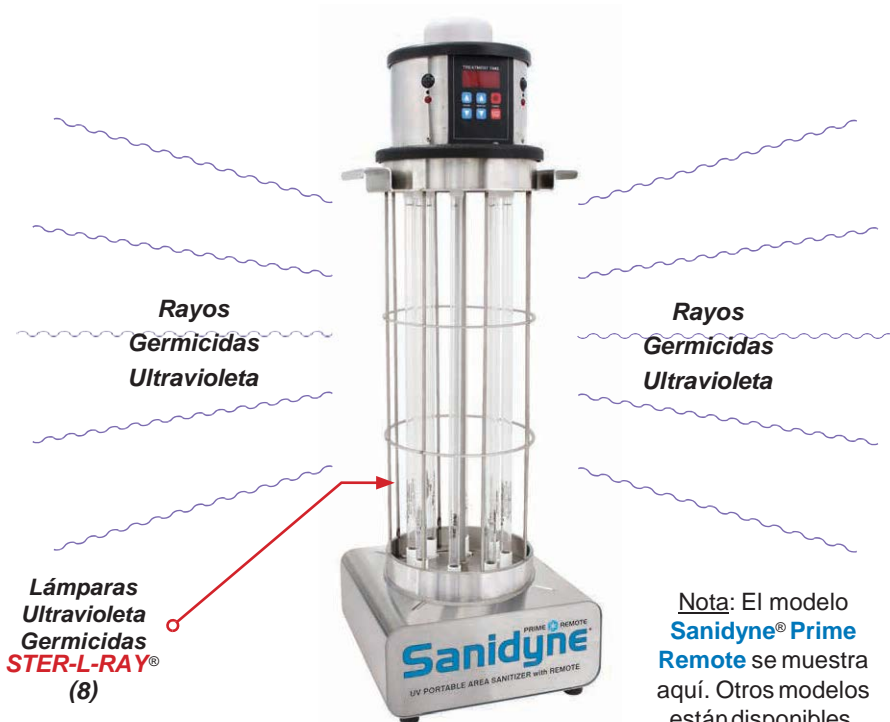

Sanidyne® opera de la siguiente forma:

1. Asegúrese que el ambiente este **desocupada** (el **Sanidyne®** sólo puede ser usado en áreas desocupadas). Coloque letreros de advertencia (incluidos) en todas las puertas de acceso al ambiente que va a ser desinfectado con el **Sanidyne®**.
2. Determine el tiempo de tratamiento y pulse el botón de activación, el dispositivo tiene incorporado una demora de un minuto y treinta segundos que permite que el operador deje el área.
3. Los rayos ultravioleta son proyectados dentro del área **desocupada** por el período de tiempo programado.
4. El aire y las superficies expuestas dentro del ambiente son desinfectados. Los microorganismos infecciosos como las bacterias, el moho, y los virus son eliminados.
5. El ciclo de tratamiento del **Sanidyne®** termina. Su diseño compacto y peso liviano permite que se transporte fácilmente al próximo ambiente.

Sanitizador UV de Área Portátil Sanidyne® Prime ✱

Lámparas Ultravioleta Germicidas **STER-L-RAY®** de Alto Rendimiento

Lámparas especialmente diseñadas de alto rendimiento proveen lo máximo en calidad, rendimiento sostenido y longevidad (Para información adicional vea la página 10). El Escudo de Seguridad ArmorLite™ es una cubierta protectora que se aplica sobre las lámparas germicidas. Esta elimina los peligros asociados con el estallado de la lámpara.

Protector de Lámpara

La rejilla de acero inoxidable protege las lámparas **STER-L-RAY®**.

Construcción de Acero Inoxidable

La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable.

Balastos Surelite™


Balastos electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de lámparas ultravioleta. Balastos versátiles proporcionan un alto nivel de rendimiento a las lámparas; son livianos, eficientes y operan con emisiones bajas para un uso prolongado.

Temporizador de Intervalo de 24 Horas

El Temporizador se programa fácilmente y permite que sea configurado de acuerdo al tamaño del ambiente.

Señales de Advertencia Promate™ (2)

Para ser colocados en las puertas de ingreso para advertir que está en uso un sanitizador ultravioleta y que no se debe ingresar al área de tratamiento. El **Sanidyne® Prime** es solamente para uso en áreas **desocupadas**.

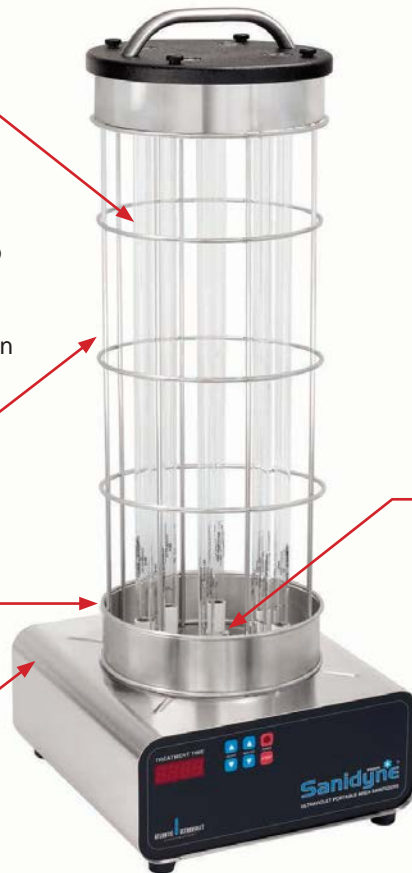

Portales de Observación (4)

Situados en la parte superior del **Sanidyne Prime®**, estos portales permiten la inspección de las lámparas cuando la cubierta de almacenamiento está puesta para evitar el riesgo de exposición a la luz ultravioleta.

Portalámparas Tipo Bayoneta Steadfast™

Portalámparas de 4 pins tipo bayoneta, sujeta la lámpara de forma segura, además permite un cambio de lámpara rápido y fácil.

Careta Protectora Promate™

(no mostrado, viene una unidad con este modelo) Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara de los rayos ultravioleta germicidas.

Gafas Protectoras Promate™


Las gafas de seguridad deben usarse como protección de propósito general y como protección adicional contra los rayos ultravioleta germicidas.

Mecanismo de Demora de Un Minuto y Treinta Segundos

Después de activar el botón de inicio, se escucha por un minuto y treinta segundos un sonido de alarma para permitir que el operador deje el área antes del inicio del ciclo de desinfección y del encendido de las lámparas.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

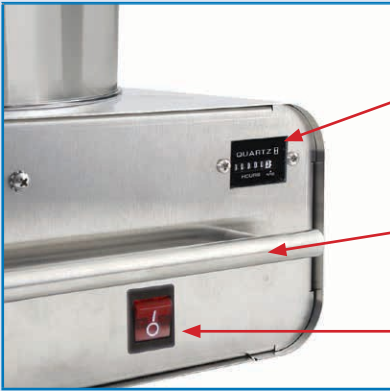

Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™

Muestra el tiempo real de las horas de operación e impide que sean alteradas.

Enrollador de Cordón

Almacenamiento cómodo del cordón cuando el **Sanidyne® Prime** no está en uso.

Interruptor de Corriente



Asa de Transporte

Proporciona buena sujeción para transportar el **Sanidyne® Prime**.

Cubierta de Almacenamiento Rígida Removible

Protege las Lámparas Germicidas Ultravioleta **STER-L-RAY®** contra roturas durante el transporte o almacenamiento del **Sanidyne Prime®** y permite la inspección de las lámparas en funcionamiento.



Detector Ultravioleta Zenith™

- Medidor ultravioleta manual e independiente, a baterías de alto umbral.
- Monitorea la intensidad y el envejecimiento de las lámparas germicidas UV-C.
- Mide la pérdida del accesorio germicida UV-C.

ESPECIFICACIONES—SANITIZADOR UV DE AREA PORTÁTIL Sanidyne® Prime ❄️

Modelo	Amperios	Hertz	Consumo de Energía ①	Tiempo de Tratamiento Máximo	Número de la Lámpara (Cantidad)	Rendimiento Ultravioleta ②	Peso kg (lbs)	Dimensiones – m (pulgadas)			Vida Útil Promedio Normal de la Lámpara
								Largo	Ancho	Altura	
120v	4.5	50/60	550 Watts	24 Horas	05-0892 (8)	143 Watts	12.2 (27)	.35 (13-15/16")	.31 (12-1/16")	.80 (31-1/2")	13,000 Horas
220v	2.5	50/60	550 Watts	24 Horas	05-0892 (8)	143 Watts	12.2 (27)	.35 (13-15/16")	.31 (12-1/16")	.80 (31-1/2")	13,000 Horas

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

Sanitizador UV de Área Portátil Sanidyne® Prime Remote ✨ Remote

Domo WiFi

Sensores de Ocupación

**Lámparas Ultravioleta Germicidas
STER-L-RAY® de Alto Rendimiento**

Lámparas especialmente diseñadas de alto rendimiento proveen lo máximo en calidad, rendimiento sostenido y longevidad (Para información adicional vea la página 10). El Escudo de Seguridad **ArmorLite™** es una cubierta protectora que se aplica sobre las lámparas germicidas. Esta elimina los peligros asociados con el estallado de la lámpara.

Protector de Lámpara

La rejilla de acero inoxidable protege las lámparas **STER-L-RAY®**.

Balastos Surelite™

Balastos electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de lámparas ultravioleta. Balastos versátiles proporcionan un alto nivel de rendimiento a las lámparas; son livianos, eficientes y operan con emisiones bajas para un uso prolongado.

Construcción de Acero Inoxidable

La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable.

Señales de Advertencia Promate™ (2)

Para ser colocados en las puertas de ingreso para advertir que está en uso un sanitizador ultravioleta y que no se debe ingresar al área de tratamiento. El **Sanidyne® Prime Remote** es solamente para uso en áreas desocupadas.



Control de Teclado



Temporizador de Intervalo de 24 Horas

El Temporizador se programa fácilmente y permite que sea configurado de acuerdo al tamaño del ambiente.

Mecanismo de Demora de Un Minuto y Treinta Segundos

Después de activar el botón de inicio, se escucha por un minuto y treinta segundos un sonido de alarma para permitir que el operador deje el área antes del inicio del ciclo de desinfección y del encendido de las lámparas.

Portalámparas Tipo Bayoneta Steadfast™

Portalámparas de 4 pins tipo bayoneta, sujeta la lámpara de forma segura, además permite un cambio de lámpara rápido y fácil.

Careta Protectora Promate™

(no mostrado, viene una unidad con este modelo) Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara de los rayos ultravioleta germicidas.

Gafas Protectoras Promate™


Las gafas de seguridad deben usarse como protección de propósito general y como protección adicional contra los rayos ultravioleta germicidas.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Control Remoto

Comande su **Sanidyne® Prime Remote** a distancia mediante el uso de este práctico dispositivo.

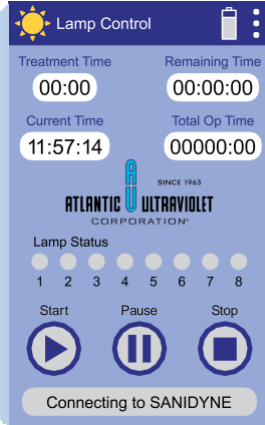

Detector Ultravioleta Zenith™

- Medidor ultravioleta manual e independiente, a baterías de alto umbral.
- Monitorea la intensidad y el envejecimiento de las lámparas germicidas UV-C.
- Mide la pérdida del accesorio germicida UV-C.

Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™

Muestra el tiempo real de las horas de operación e impide que sean alteradas.

Enrollador de Cordón

Almacenamiento cómodo del cordón cuando el **Sanidyne® Prime Remote** no está en uso.

Interruptor de Corriente



Asas de Transporte
Proporciona buena sujeción para transportar el **Sanidyne® Prime Remote**.

ESPECIFICACIONES—SANITIZADOR UV DE AREA PORTÁTIL Sanidyne® Prime Remote

Modelo	Amperios	Hertz	Consumo de Energía ①	Tiempo de Tratamiento Máximo	Número de la Lámpara (Cantidad)	Rendimiento Ultravioleta ②	Peso kg (lbs)	Dimensiones – m (pulgadas)			Vida Útil Promedio Normal de la Lámpara
								Largo	Ancho	Altura	
120v	4.5	50/60	550 Watts	24 Horas	05-0892 (8)	143 Watts	12.7 (28)	.35 (13-15/16")	.31 (12-1/16")	.94 (36-13/16")	13,000 Horas
220v	2.5	50/60	550 Watts	24 Horas	05-0892 (8)	143 Watts	12.7 (28)	.35 (13-15/16")	.31 (12-1/16")	.94 (36-13/16")	13,000 Horas

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

Sanitizador UV de Área Portátil Sanidyne® Plus +

Domo WiFi

Sensores de Ocupación

Lámparas Ultravioleta Germicidas

STER-L-RAY® de Alto Rendimiento

Lámparas especialmente diseñadas de alto rendimiento para proveer lo máximo en calidad, rendimiento sostenido, y longevidad (Para información adicional vea la página 10). El Escudo de Seguridad **ArmorLite™** es una cubierta protectora que se aplica sobre las lámparas germicidas. Esta elimina los peligros asociados con el estallado de la lámpara.

Asa de Transporte

Proporciona buena sujeción para transporta el **Sanidyne® Plus**.

Protector de Lámpara

La rejilla de acero inoxidable protege las lámparas **STER-L-RAY®**.

Construcción de Acero Inoxidable

La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable.

Balastos Surelite™

Balastos electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de lámparas ultravioleta. Balastos versátiles proporcionan un alto nivel de rendimiento a las lámparas; son livianos, eficientes y operan con emisiones bajas para un uso prolongado.

Señales de Advertencia Promate™ (4)

Para ser colocados en las puertas de ingreso para advertir que está en uso un sanitizador ultravioleta y que no se debe ingresar al área de tratamiento. El **Sanidyne® Plus** es solamente para uso en áreas **desocupadas**.



Control de Teclado



Temporizador de Intervalo de 24 Horas

El Temporizador se programa fácilmente y permite que sea configurado de acuerdo al tamaño del ambiente.

Mecanismo de Demora de Un Minuto y Treinta Segundos

Después de activar el botón de inicio, se escucha por un minuto y treinta segundos un sonido de alarma para permitir que el operador deje el área antes del inicio del ciclo de desinfección y del encendido de las lámparas.

Soporte Telescopico Steadfast™ para Lámpara de Dos Pines

Sujeta la lámpara de dos pines de manera segura mientras proporciona remplazo conveniente de lámpara "rápido y fácil."

Careta Protectora Promate™

(no mostrada, 2 suministros con este modelo) Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara de los rayos ultravioleta germicidas.

Gafas Protectoras Promate™


Las gafas de seguridad deben usarse como protección de propósito general y como protección adicional contra los rayos ultravioleta germicidas.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Control Remoto

Comande su **Sanidyne® Plus** a distancia mediante el uso de este práctico dispositivo.

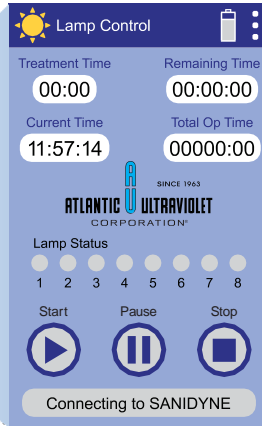

Detector Ultravioleta Zenith™

- Medidor ultravioleta manual e independiente, a baterías de alto umbral.
- Monitorea la intensidad y el envejecimiento de las lámparas germicidas UV-C.
- Mide la pérdida del accesorio germicida UV-C.

Interruptor de Corriente



Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™

Muestra el tiempo real de las horas de operación e impide que sean alteradas.

Enrollador de Cordón

Almacenamiento cómodo del cordón cuando el **Sanidyne® Plus** no está en uso.

Ruedas con Función de Bloqueo

Permite que el **Sanidyne® Plus** sea transportado fácilmente de una ubicación a otra.



ESPECIFICACIONES — SANITIZADOR UV DE AREA PORTÁTIL Sanidyne® Plus +

Modelo	Amperios	Hertz	Consumo de Energía ①	Tiempo de Tratamiento Máximo	Número de la Lámpara (Cantidad)	Rendimiento Ultravioleta ②	Peso kg (lbs)	Dimensiones – m (pulgadas)			Vida Útil Promedio Normal de la Lámpara
								Largo	Ancho	Altura	
120v	10	50/60	1200 Watts	24 Horas	05-0893 (8)	312 Watts	34.5 (76)	.55 (21-3/4")	.51 (20")	1.74 (68-1/2")	13,000 Horas
230v	5	50/60	1200 Watts	24 Horas	05-0893 (8)	312 Watts	34.5 (76)	.55 (21-3/4")	.51 (20")	1.74 (68-1/2")	13,000 Horas

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

Sanitizador UV de Área Portátil Sanidyne® Premium ⚙️

Domo WiFi

Sensores de Ocupación

Lámparas de Amalgama Ultravioleta Germicidas *STER-L-RAY*®

Lámparas de amalgama están especialmente diseñadas para proveer lo máximo en calidad, rendimiento sostenido, y longevidad (Para información adicional vea la página 10). El Escudo de Seguridad **ArmorLite™** es una cubierta protectora que se aplica sobre las lámparas germicidas. Esta elimina los peligros asociados con el estallado de la lámpara.

Protector de Lámpara

La rejilla de acero inoxidable protege las lámparas *STER-L-RAY*®.

Construcción de Acero Inoxidable

La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable.

Balastos Surelite™

Balastos electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de lámparas de amalgama ultravioleta. Versátiles, balastos con pre calentado eficiente proporcionan un alto nivel de rendimiento a las lámparas. Operan con 120v.

Ventilador de Enfriamiento con Filtros (4)

Se encuentran de ambos lados del **Sanidyne® Premium**, estos enfrían los balastos **Surelite™** durante su operación.

Señales de Advertencia Promate™ (4)

Para ser colocados en las puertas de ingreso para advertir que está en uso un sanitizador ultravioleta y que no se debe ingresar al área de tratamiento. El **Sanidyne® Premium** es solamente para uso en áreas **desocupadas**.



Control de Teclado



Temporizador de Intervalo de 24 Horas

El Temporizador se programa fácilmente y permite que sea configurado de acuerdo al tamaño del ambiente.

Mecanismo de Demora de Un Minuto y Treinta Segundos

Después de activar el botón de inicio, se escucha por un minuto y treinta segundos un sonido de alarma para permitir que el operador deje el área antes del inicio del ciclo de desinfección y del encendido de las lámparas.

Asa de Transporte

Proporciona buena sujeción para transporta el **Sanidyne® Premium**.

Soporte Telescopico Steadfast™ para Lámpara de Dos Pines

Sujeta la lámpara de dos pines de manera segura mientras proporciona remplazo conveniente de lámpara "rápido y fácil."

Careta Protectora Promate™

(no mostrada, 2 suministros con este modelo) Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara de los rayos ultravioleta germicidas.

Gafas Protectoras Promate™


Las gafas de seguridad deben usarse como protección de propósito general y como protección adicional contra los rayos ultravioleta germicidas.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Control Remoto

Comande su **Sanidyne® Premium** a distancia mediante el uso de este práctico dispositivo.

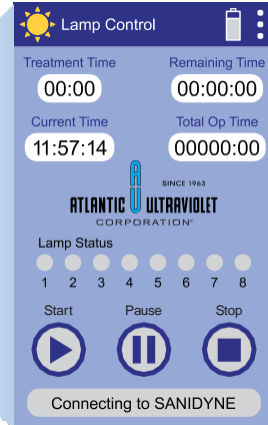

Detector Ultravioleta Zenith™

- Medidor ultravioleta manual e independiente, a baterías de alto umbral.
- Monitorea la intensidad y el envejecimiento de las lámparas germicidas UV-C.
- Mide la pérdida del accesorio germicida UV-C.

Interruptor de Corriente



Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™

Muestra el tiempo real de las horas de operación e impide que sean alteradas.

Enrollador de Cordón

Almacenamiento cómodo del cordón cuando el **Sanidyne® Plus** no está en uso.

Ruedas con Función de Bloqueo

Permite que el **Sanidyne® Plus** sea transportado fácilmente de una ubicación a otra.



ESPECIFICACIONES — SANITIZADOR UV DE AREA PORTÁTIL Sanidyne® PREMIUM ⚙️

Modelo	Amperios	Hertz	Consumo de Energía ①	Tiempo de Tratamiento Máximo	Número de la Lámpara (Cantidad)	Rendimiento Ultravioleta ②	Peso kg (lbs)	Dimensiones – m (pulgadas)			Vida Útil Promedio Normal de la Lámpara
								Largo	Ancho	Altura	
120v	16	50/60	1950 Watts	24 Horas	05-0250 (8)	480 Watts	47.2 (104)	.55 (21-3/4")	.53 (20-15/16")	1.74 (68-1/2")	13,000 Horas

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

LÁMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS GENUINAS **STER-L-RAY**®

Las lámparas germicidas **STER-L-RAY**® son tubos de onda corta que producen ondas ultravioleta letales para los microorganismos. Aproximadamente el 95% de la energía ultravioleta emitida por las lámparas **STER-L-RAY**® está a 254 nanómetros, potencia germicida más destructiva para las bacterias, el moho y los virus.

Las lámparas de alto rendimiento germicidas UV **STER-L-RAY**® (HO por sus siglas en inglés) son similares en tamaño y forma a las lámparas convencionales, pero estas son capaces de rendir una producción mayor de UV.

Lámparas de amalgama de mayor rendimiento **STER-L-RAY**® proveen rendimiento ultravioleta germicida tres veces más que las lámparas germicidas convencionales de longitud similar sin sacrificar rendimiento o el promedio de vida. Lámparas de amalgama de mayor rendimiento **STER-L-RAY**® son la mayor expresión de tecnología ultravioleta en lámpara y como tal se ven sometidas a un proceso de desarrollo y mejora técnica interminable. Tenemos disponible diseños personalizados y patentados para satisfacer cualquier necesidad especializada.

Se añaden Escudos de Seguridad **ArmorLite**™ a las lámparas ultravioleta germicida **STER-L-RAY**® en todas las unidades **Sanidyne**® para asegurar la protección de sus empleados, sus productos y el ambiente de trabajo mediante la eliminación de peligros asociados con el estallado o la rotura de lámparas.

STER-L-RAY®, **ArmorLite**™, y los logotipos **Sanidyne**® Prime, **Sanidyne**® Prime Remote, **Sanidyne**® Plus, **Sanidyne**® Premium, son marcas registradas de Ultraviolet Corporation®.

ADVERTENCIA: Exposición directa o reflejada a los rayos ultravioleta germicida causará irritación dolorosa en los ojos y enrojecimiento de la piel. El personal que se vea directamente o por reflejo expuesto a los rayos debe usar escudo facial adecuado, guantes, y ropa protectora.

LÁMPARA CONTIENE MERCURIO – Hg, siga las leyes de eliminación; visite: LampRecycle.org.



Lámparas Germicidas **STER-L-RAY**® de Alto Rendimiento con Escudo de Seguridad **ArmorLite**™ se usan en **Sanidyne**® Prime y **Sanidyne**® Prime Remote





Lámparas Germicidas **STER-L-RAY**® de Alto Rendimiento con Escudo de Seguridad **ArmorLite**™ se usan en **Sanidyne**® Plus



Lámparas de Amalgama Germicidas **STER-L-RAY**® con Escudo de Seguridad **ArmorLite**™ se usan en **Sanidyne**® Premium

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

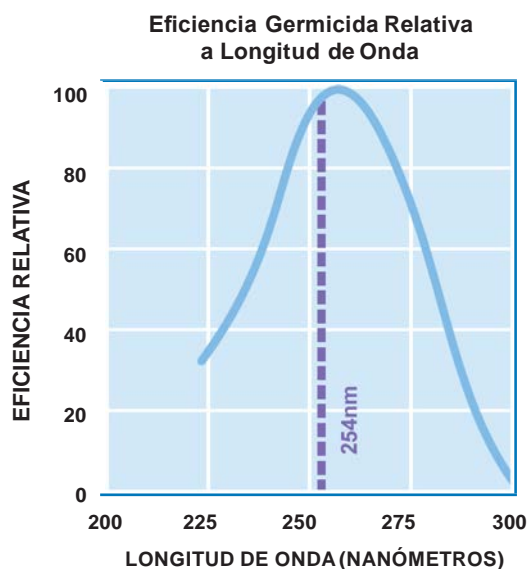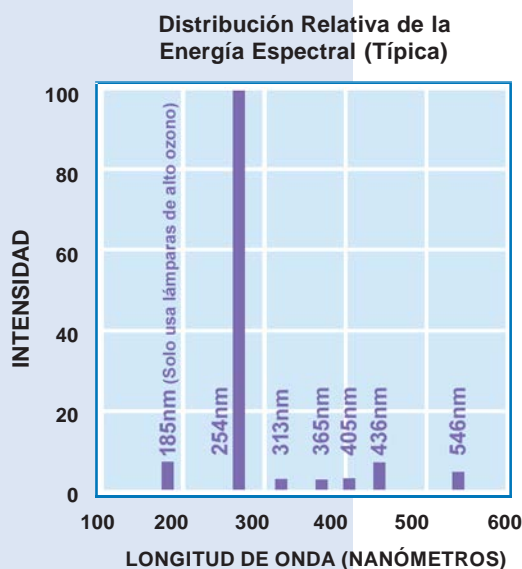

DOSIS ULTRAVIOLETA

Lámparas germicidas proveen protección efectiva contra microorganismos. Se muestra una pequeña sección transversal, mas abajo.

ORGANISMO	NOMBRE ALTERNATIVO	TIPO	ENFERMEDAD	DOSIS*
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	<i>C. diphtheriae</i>	Bacteria	Difteria	6.50
<i>Legionella pneumophila</i>	<i>L. pneumophila</i>	Bacteria	Enfermedad del legionario	12.30
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>M. tuberculosis</i>	Bacteria	Tuberculosis (TB)	10.00
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>P. aeruginosa</i>	Bacteria	————	3.90
<i>Serratia Marcescens</i>	<i>S. marcescens</i>	Bacteria	————	6.160
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>S. aureus</i>	Bacteria	Intoxicación alimentaria	6.60
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	Bacteria	————	5.80
<i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>	MRSA	Bacteria		6.50
<i>Clostridium difficile</i>	<i>C. diff</i>	Spore		16.00
Adeno Virus Type III	————	Virus	————	4.50
Coxsackie A2	————	Virus	————	6.30
Influenza	————	Virus	Gripe	6.60

* Dosis Nominal Ultravioleta (mJ/s²) necesaria para inactivar más del 99% del microorganismo específico. Consulte con la fábrica para un listado más completo.


APLICACIONES

Los Sanitizadores UV de Área Portátil **Sanidyne**[®] desinfecta el aire y las superficies en áreas **desocupadas** por medio de ocho lámparas ultravioleta germicidas **STER-L-RAY**[®]. Las lámparas **STER-L-RAY**[®] generan altos niveles de radiación ultravioleta germicida letal para las bacterias, el moho, los virus, y los hongos. Su diseño compacto y peso liviano permite que el **Sanidyne**[®] Plus sea transportado fácilmente de un lugar a otro, suministrando desinfección donde y cuando sea necesaria.

Aplicaciones típicas del **Sanidyne**[®] incluyen: Quirófanos, Cuartos de pacientes, Laboratorios, Cuartos Limpios, Áreas de Trabajo Abiertas, Refugios para Desamparados, Auditorios, Cuartos de Hotel, Gimnasios, Morgues, Áreas Abiertas de Oficina, o áreas donde no es una opción tener artefactos instalados permanentemente.


Los Sanitizadores UV de Área Portátil **Sanidyne**[®] no requiere instalación profesional.

Se **debe evitar** acceso al ambiente mientras el **Sanidyne**[®] está en funcionamiento.

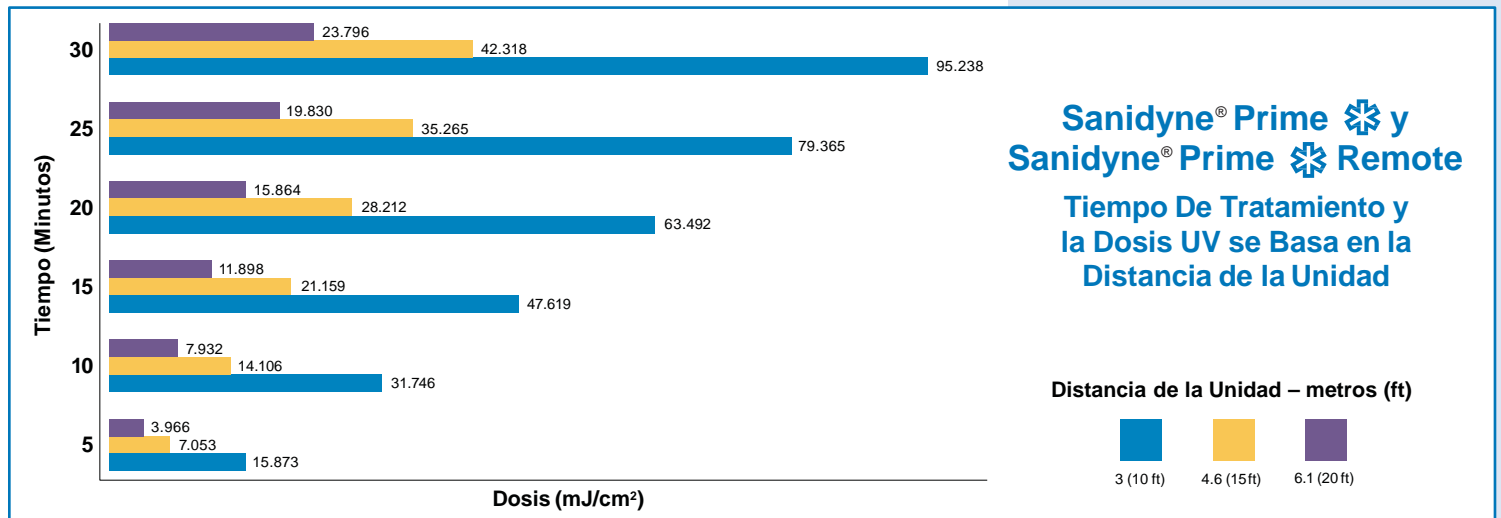


Nota: La dosis que se muestra arriba se expresa como mJ/cm² (milijulios por centímetro cuadrado).

APLICACIONES

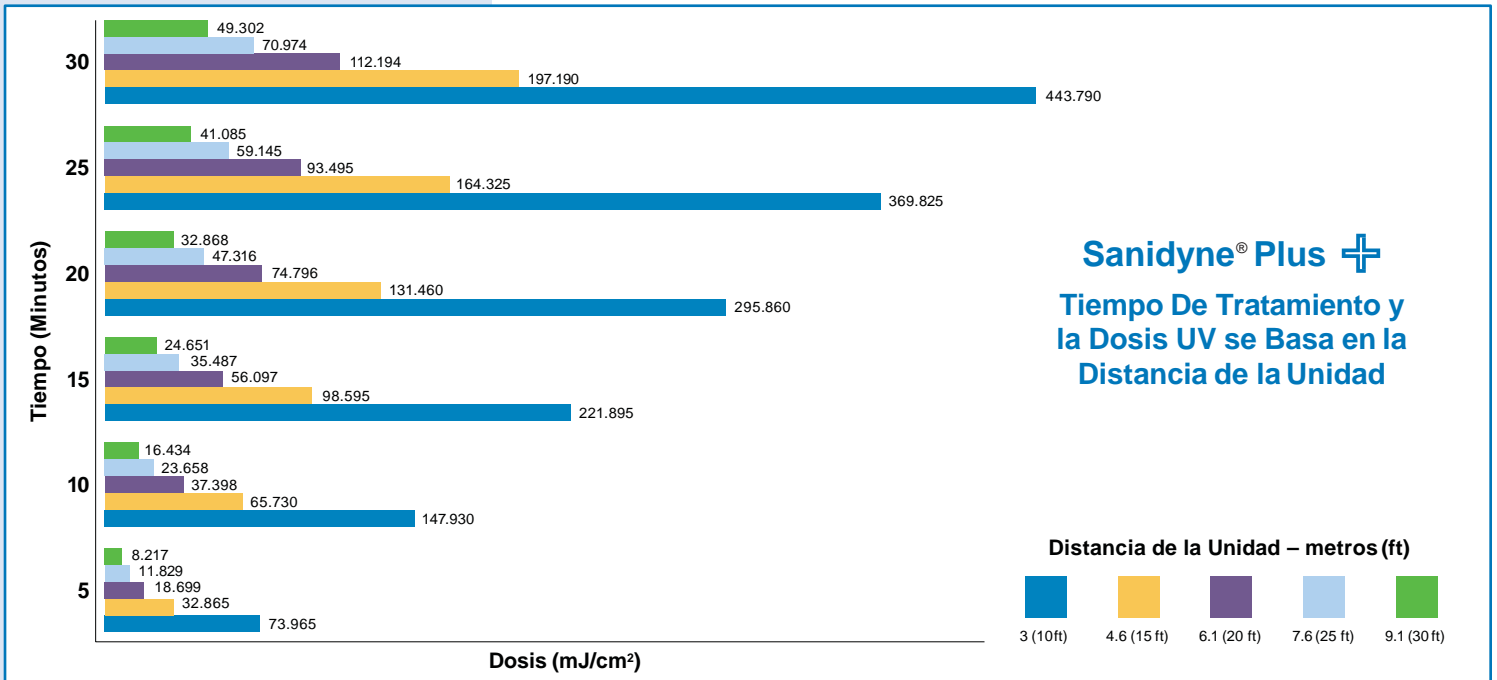

Nota: La dosis que se muestra arriba se expresa como mJ/cm² (milijulios por centímetro cuadrado).

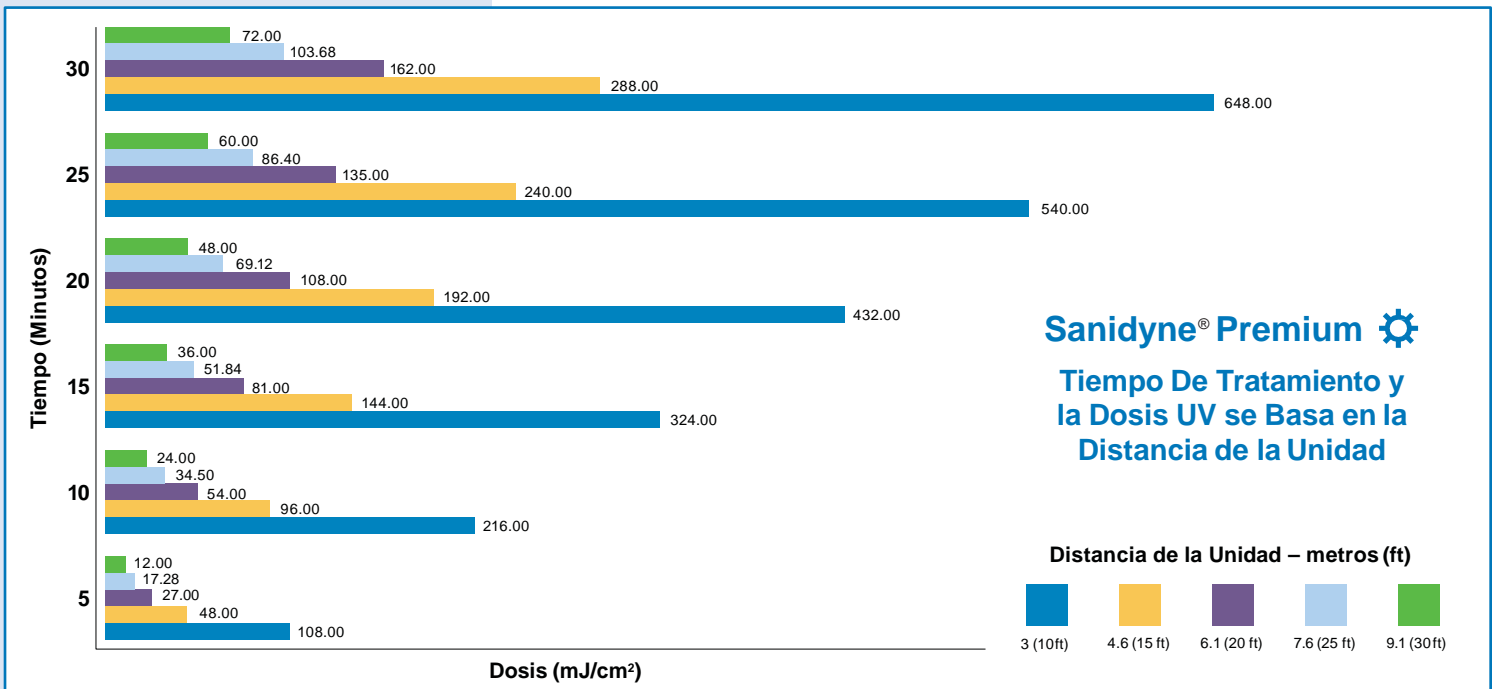

Nota: La dosis que se muestra arriba se expresa como mJ/cm² (milijulios por centímetro cuadrado).

El Estándar de Excelencia en Ultravioleta



Fabricantes / Ingenieros / Ventas / Servicio – Ultravioleta Germicida - Equipo y Lámparas



Online: www.fahsal.com

Email: fernando.martin@fahsal.com

Tel: +17862615465

10850 NW 21 st , Suite 130 • Miami, FL 33172 • +1 7862615465 •

Email: fernando.martin@fahsal.com

La información y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en datos recopilados por Ultraviolet Corporation® y creemos en su certeza. Sin embargo, no se garantiza o se ofrece garantía, expresa o implícita, con respecto a la información contenida en el presente documento. Las especificaciones y la información de este documento están sujetos a cambios sin aviso previo.

Documento No. 98-1718 • marzo 2020

